


SyncVR

SyncVR - Update - Instructies


Deze instructie bestaat uit twee onderdelen: de Algemene Update en de Content Update. Het is de bedoeling dat je ze beide doorloopt.


Onderdeel 1: Algemene update

1. Zet de Oculus aan, je komt in het standaard Oculus Home screen.
2. Selecteer in het menu onderin "Bibliotheek".

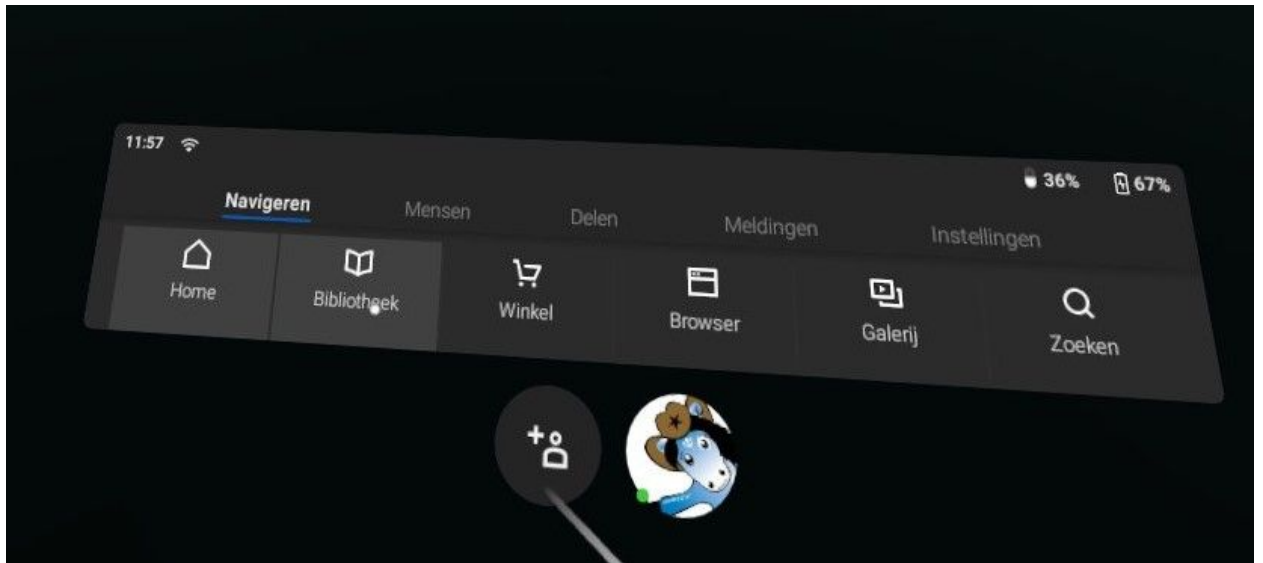

3. Selecteer in het menu links "Updates".

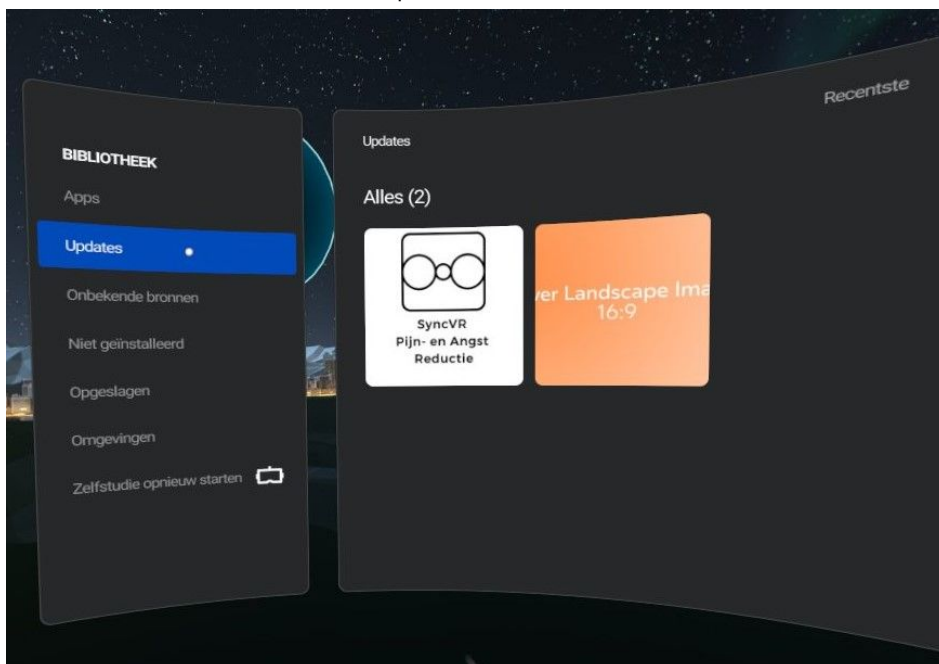

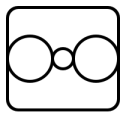


SyncVR


4. De "SyncVR Pijn en Angstreductie" app zal in de lijst staan als er een update beschikbaar is. Klik op de app. De update wordt nu gedownload en geïnstalleerd.

NB: als de app niet in de lijst staat, dan zal de laatste Algemene Update al uitgevoerd zijn. Ga in dit geval door naar onderdeel 2: Content Update



5. Als het updaten klaar is, verschijnt er een melding in het menu onderin.

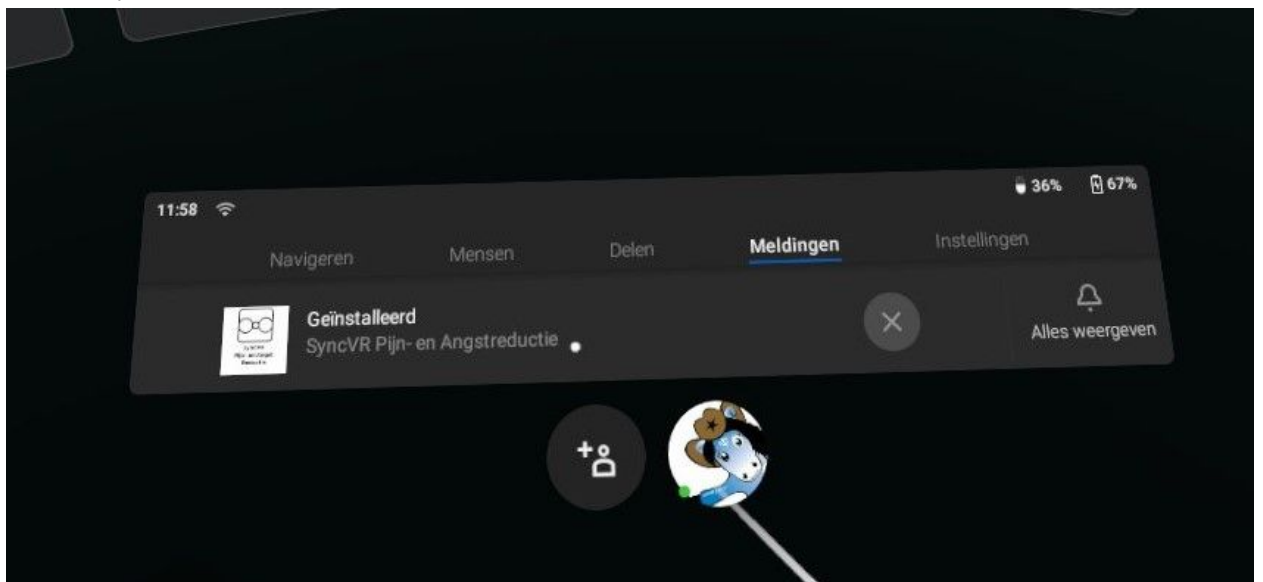


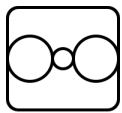


SyncVR


Onderdeel 2: Content Update

1. Start de "SyncVR Pijn en Angstreductie" app.

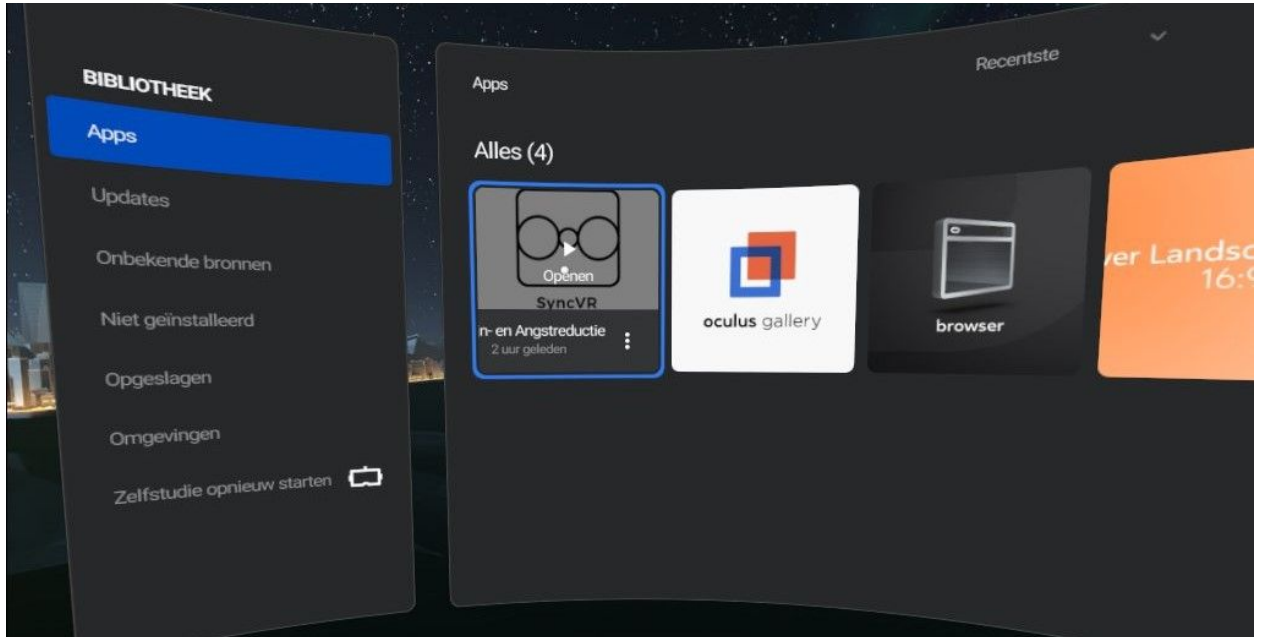


2. De app start in het hoofdmenu:

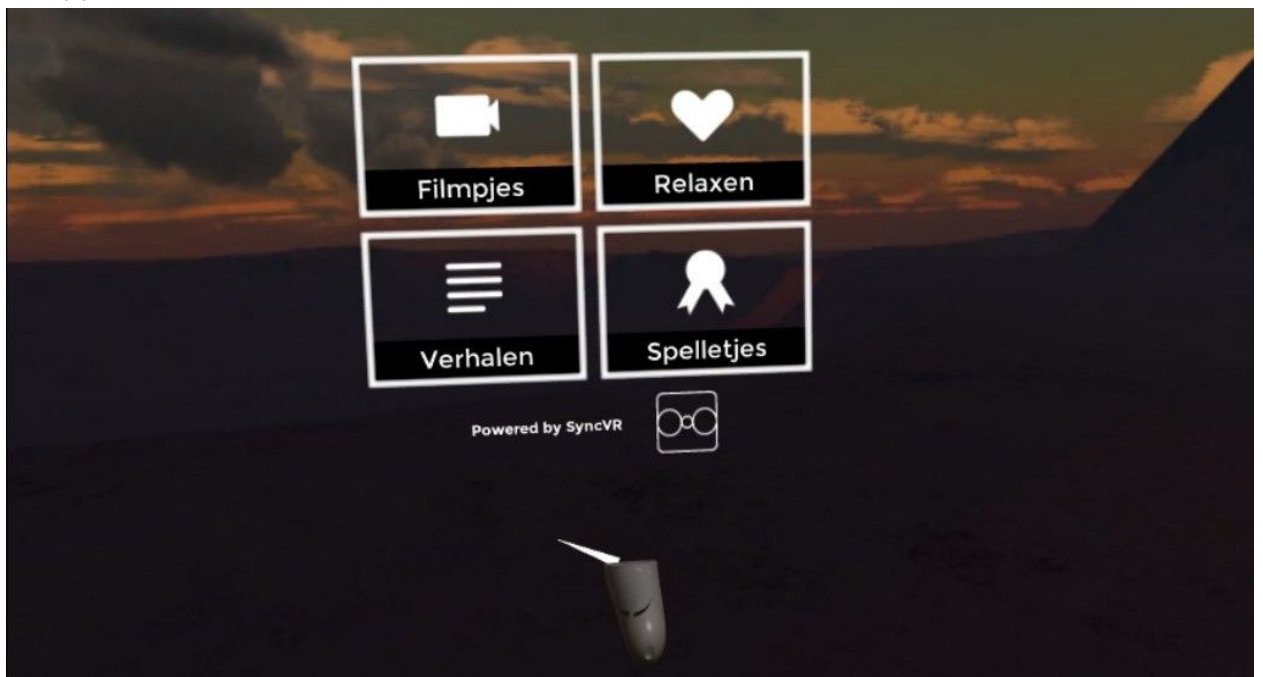

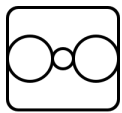

SyncVR


3. Kijk achter je door 180 graden te draaien. Hier bevindt zich een tweede menu. Klik in dit menu op "Update Menu".

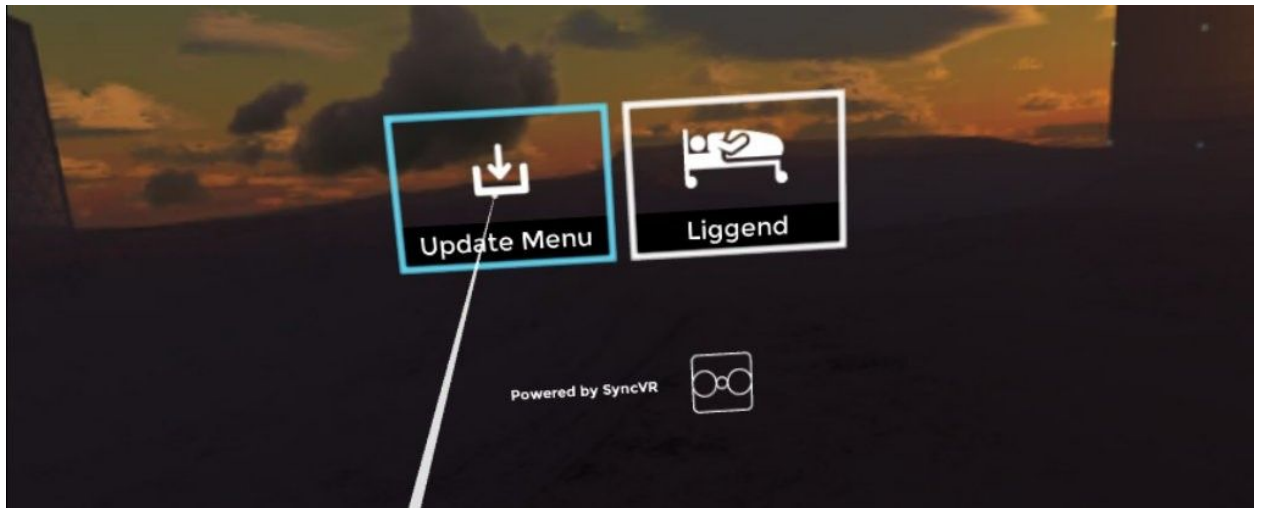

4. De app haalt een lijst met beschikbare content updates op, en geeft de benodigde wijzigingen weer.




5. Klik rechts op "Uitvoeren".

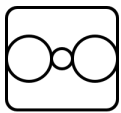

SyncVR

- De App zal een samenvatting geven van wat er gaat gebeuren, en vragen of je het zeker weet. Bevestig door het vinkje te selecteren.

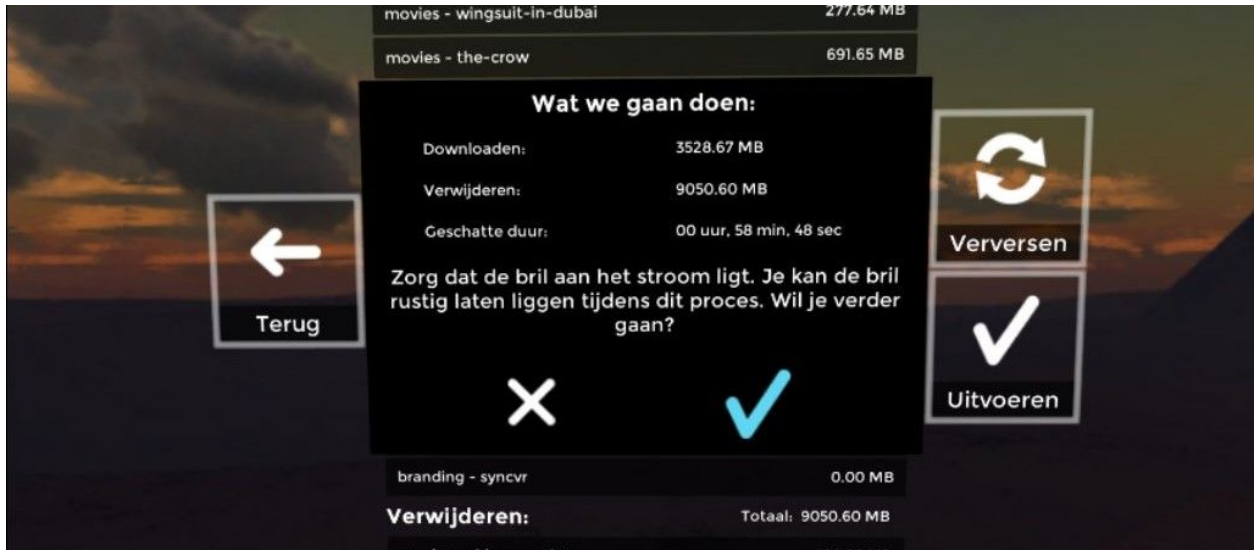

- De app gaat nu nieuwe content downloaden, en oude content verwijderen. Dit proces kan een tijdje duren. Je kan de headset gewoon wegleggen tijdens het updaten, maar zorg wel dat hij aan het stroom ligt.



- Als alle balkjes groen zijn is de update succesvol uitgevoerd. Klik op "Terug", en je al de nieuwe content direct beschikbaar hebben in de app.